

## **Czech (CS)**

### **Indikace a cílová skupina pacientů**

Bulkamid® Hydrogel je určen k použití jako agens pro uretrální bulking pro léčbu ženské močové inkontinence v případech s významnou stresovou složkou. Bulkamid® Hydrogel je určen pro dospělé pacientky (ženy starší než 18 let).

### **Kontraindikace**

Bulkamid® Hydrogel se nesmí používat u pacientek trpících akutní infekcí močového měchýře nebo močových cest (močové trubice) nebo u pacientek s poškozenou tkání močové trubice. Pacientky, které mají aktivní herpes v oblasti genitálií, nesmí být léčeny injekcí prostředku Bulkamid® Hydrogel.

### **Varování a bezpečnostní opatření**

Pro vás jako pacientku nejsou v souvislosti s injekcemi prostředku Bulkamid® stanovena žádná konkrétní opatření nebo varování. Před zákrokem vám lékař sdělí informace o léčbě a případných opatřeních, která byste měla dodržovat, například pokud budete podstupovat zákrok v celkové anestezii. Měla byste informovat budoucího poskytovatele zdravotní péče o své léčbě prostředkem Bulkamid® Hydrogel. Pokud budete po léčbě prostředkem Bulkamid® Hydrogel potřebovat chirurgický zákrok nebo větší stomatologický zákrok, měl by lékař zvážit léčbu antibiotiky ke snížení rizika infekce. Existuje také riziko, že implantát může při budoucích vyšetřeních vypadat jako onemocnění.

### **Rizika a varování**

Pokud se domníváte, že u vás nastaly nežádoucí účinky spojené s prostředkem Bulkamid® Hydrogel nebo jeho použitím, nebo máte obavy ohledně rizik, obraťte se na svého lékaře. Tento dokument není určen k nahrazení konzultace s vaším lékařem, pokud je to nutné. Jako u každého zákroku existuje riziko infekce, a proto se před zákrokem doporučuje podávání antibiotik. Před zákrokem vás lékař bude informovat o zamýšleném použití, očekávaných výsledcích, kontraindikacích, bezpečnostních opatřeních, varováních a případných nežádoucích účincích.

### **Možné komplikace**

Mohou nastat komplikace. Ty mohou zahrnovat bolest během výkonu a/nebo krátce po něm (zde pomůže lokální anestezie), malé množství krve v moči, opožděné močení, bolestivé močení a/nebo infekce močových cest. Tyto komplikace jsou přechodné a běžně vymizí během několika dnů. Ve vzácných případech můžete mít problém s vymočením (retence) a možná budete k vyprázdnění močového měchýře potřebovat jednorázový katetr. To obvykle odezní během 24 hodin. Může se objevit naléhavá inkontinence, což je náhlá a intenzivní potřeba močit. Ve velmi vzácných případech (<1/10 000 injekcí) se může v důsledku infekce vytvořit infekční uzlík (absces), který se léčí antibakteriálním prostředkem.