

Croatian (HR)

Indikacije i predviđena skupina bolesnika

Bulkamid® Hydrogel namijenjen je za upotrebu kao sredstvo za povećanje volumena tkiva (engl. bulking) uretre u liječenju urinarne inkontinencije u žena sa snažnom stresnom komponentom. Bulkamid® Hydrogel namijenjen je za liječenje odraslih bolesnica (starijih od 18 godina).

Kontraindikacije

Bulkamid® Hydrogel ne smije se upotrebljavati u bolesnica koje boluju od akutne infekcije u mjehuru ili mokraćnom sustavu (mokraćnoj cijevi) ili imaju oštećeno tkivo mokraćne cijevi. Bolesnicama koje imaju aktivan herpes u genitalnom području ne smije se ubrizgavati Bulkamid® Hydrogel.

Upozorenja ili mjere opreza

Nema posebnih mjera opreza ili upozorenja za vas kao bolesnicu u vezi s injekcijama proizvoda Bulkamid®. Prije zahvata liječnik će vam opisati zahvat i reći postoje li mjere opreza koje biste trebali poduzeti, na primjer ako ćete se podvrgnuti zahvatu pod općom anestezijom.

Ubuduće ćete ostale liječnike morati obavijestiti o liječenju proizvodom Bulkamid® Hydrogel. Ako se nakon liječenja proizvodom Bulkamid® Hydrogel morate podvrgnuti kirurškom ili većem stomatološkom zahvatu, liječnik mora razmotriti primjenu antibiotika kako bi se smanjio rizik od infekcije. Postoji i rizik da će se implantat doimati kao bolest na budućim pregledima.

Rizici i upozorenja

Obratite se liječniku ako vjerujete da imate nuspojave povezane s proizvodom Bulkamid® Hydrogel ili njegovom upotrebom ili ako ste zabrinuti u vezi s rizicima. Ovaj dokument ne može zamijeniti konzultacije s vašim liječnikom ako su potrebne. Kao i kod ostalih zahvata, postoji rizik od infekcije, pa se preporučuje da prije zahvata primite antibiotik. Prije zahvata liječnik će vas upoznati s namjenom, očekivanim rezultatom, kontraindikacijama, mjerama opreza, upozorenjima i mogućim nuspojavama.

Mogu se pojaviti komplikacije. Među njima mogu biti prolazan bol tijekom i/ili neposredno nakon postupka (pri čemu pomaže lokalna anestezija), mala količina krvi u mokraći, odgođeno mokrenje, bolno mokrenje i/ili infekcija mokraćnog sustava. Te su komplikacije prolazne i tipično se povuku u roku od nekoliko dana. U rijetkim slučajevima bolesnice mogu imati otežano mokrenje (retencija), pa će možda morati primijeniti jednokratni

kateter za pražnjenje mokraćnog mjehura. To se stanje obično povuče u roku od 24 sata. Može se pojaviti urgentna inkontinencija, što je iznenadna i intenzivna potreba za mokrenjem. U vrlo rijetkim slučajevima ($< 1/10\,000$ štrcaljki) može se stvoriti gnojni čvorić (apsces) kao posljedica infekcije (koja se liječi antibakterijskim lijekom).