

Danish (DA)

Indikation og tilsigtet patientgruppe

Bulkamid® Hydrogel er beregnet til anvendelse som udfyldningsmiddel i urinrøret til behandling af urininkontinens hos kvinder, hvor stress-komponenten er væsentlig. Bulkamid® Hydrogel er beregnet til kvindelige patienter (over 18 år).

Kontraindikationer

Bulkamid® Hydrogel må ikke anvendes til patienter, der lider af akut infektion i blæren eller i urinvejene (urinrøret) eller som har skader på vævet i urinrøret. Patienter med aktiv herpes omkring kønsorganerne må ikke få injektion med Bulkamid® Hydrogel.

Advarsler og forholdsregler

Der er ingen specifikke forholdsregler eller advarsler for dig som patient i forhold til indsprøjtninger med Bulkamid®. Før den medicinske procedure vil lægen informere dig om behandlingen, og om der er forholdsregler, du skal tage, for eksempel hvis du skal have foretaget proceduren under fuld bedøvelse. Du skal fremover informere eventuelle læger, der skal behandle dig, om din behandling med Bulkamid® Hydrogel. Hvis du står overfor at skulle opereres eller have foretaget en større tandbehandling efter din behandling med Bulkamid® Hydrogel, skal lægen overveje antibiotikabehandling for at mindske risikoen for infektion. Der er desuden en risiko for, at implantatet kan forveksles med en sygdom ved fremtidige undersøgelser.

Risici og advarsler

Kontakt din læge, hvis du tror, du har bivirkninger, der er relateret til Bulkamid® Hydrogel eller anvendelsen heraf, eller hvis du er bekymret over risikoen. Dette dokument er ikke beregnet som en erstatning for en lægekonsultation, hvis der er behov for det. Før proceduren vil lægen informere dig om den tilsigtede anvendelse, de forventede resultater, kontraindikationer, forsigtighedsregler, advarsler og mulige bivirkninger. Som med alle andre medicinske procedurer er der en risiko for infektion, og det anbefales derfor, at du får antibiotika før indgrebet.

Mulige komplikationer

Der kan opstå komplikationer. Disse kan omfatte midlertidige smerter under og/eller kort efter proceduren (bedøvelse hjælper på dette), en lille mængde blod i urinen, forsinket vandladning, smerter under vandladningen og/eller urinvejsinfektion. Disse komplikationer er midlertidige og forsvinder normalt i løbet af få dage. I sjældne tilfælde kan man opleve vanskeligheder ved at lade vandet (retention) og kan få brug for at bruge et engangskateter til at tømme blæren. Dette forsvinder normalt indenfor 24 timer. Der kan opstå tranginkontinens, som er en pludselig og intens vandladningstrang. I meget sjældne tilfælde (færre end 1/10.000 sprøjter) kan der dannes en byld (absces) som følge af en infektion (behandles med antibiotika).