

Finnish (FI)

Käyttöaihe ja kohdepotilasryhmä

Bulkamid® Hydrogel -hydrogeeliä käytetään virtsaputken täyteaineena sellaisen naisten virtsankarkailun hoidossa, jossa rasitus tai ponnistelu on merkittävä aiheuttava tekijä. Bulkamid® Hydrogel -hydrogeeli on tarkoitettu naispotilaille (yli 18-vuotiaat).

Vasta-aiheet

Bulkamid® Hydrogel -hydrogeeliä ei saa käyttää potilailla, joilla on aktiivinen infektio virtsarakossa tai virtsatieessä (virtsaputki) tai joiden virtsaputkessa on vaurioitunutta kudosta. Potilaille, joilla on aktiivinen sukuelinherpes, ei saa ruiskuttaa Bulkamid® Hydrogel -hydrogeeliä.

Varoitukset tai varotoimet

Potilaille ei ole erityisiä Bulkamid®-ruiskeita koskevia varotoimia tai varoituksia. Ennen toimenpidettä lääkäri kertoo hoidosta ja varotoimista, joihin on ehkä ryhdyttävä, esimerkiksi jos toimenpide tehdään yleisnukutuksessa.

Tuleville potilasta hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille on kerrottava Bulkamid® Hydrogel -hoidosta. Jos potilaalle on tehtävä merkittävä leikkaus- tai hammastoimenpide Bulkamid® Hydrogel -hoidon jälkeen, lääkärin on harkittava antibioottihoitoa infektioriskin pienentämiseksi. On myös olemassa riski siitä, että implantti voi näyttää sairaudelta tulevilla tutkimuksissa.

Riskit ja varoitukset

Jos Bulkamid® Hydrogel -hydrogeeliin tai sen käyttöön liittyviä sivuvaikutuksia ilmenee tai jos riskitekijöistä on kysyttävää, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistusta tarvittaessa. Kaikkien toimenpiteiden kyseessä ollen on infektion riski olemassa, ja tästä syystä suosittelemme antibioottilääkitystä ennen toimenpidettä. Ennen toimenpidettä lääkäri kertoo potilaalle tuotteen käyttötarkoituksesta, odotetuista tuloksista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista.

Komplikaatioita voi ilmetä. Niitä voivat olla muun muassa toimenpiteen aikainen tai pian sen jälkeen ilmenevä tilapäinen kipu (paikallispuudutus auttaa tässä), pieni määrä verta virtsassa, virtsaamisen viivästyminen, virtsaamiskipu ja/tai virtsatieinfektio. Nämä komplikaatiot ovat tilapäisiä ja menevät normaalisti ohi muutaman päivän sisällä. Hyvin harvinaisissa tapauksissa potilaiden voi olla vaikea virtsata normaalisti (virtsaumpi), minkä vuoksi heidän on käytettävä kertakäyttöistä katetria virtsarakon tyhjentämistä varten. Tämä

ongelma menee yleensä ohi 24 tunnin sisällä. Pakkokarkailua, mikä tarkoittaa äkillistä ja voimakasta tarvetta virtsata, voi ilmetä. Hyvin harvinaisissa tapauksissa ($< 1/10\,000$ ruiskusta) voi muodostua tulehtunut nystyrä (paise) tulehduksen seurauksena (se hoidetaan bakteereja tappavalla aineella).