

Hungarian (HU)

Javallat és tervezett betegcsoport

A Bulkamid® Hydrogel rendeltetése szerint urethrális párnaképző anyagként való alkalmazásra szolgál a női vizelet-inkontinencia kezelésére olyan esetekben, amikor a stressz komponens jelentős. A Bulkamid® Hydrogel felnőtt (18 éven felüli) nőbetegek kezelésére szolgál.

Ellenjavallatok

A Bulkamid® Hydrogel-t tilos olyan betegeknél használni, akik a húgyhólyag vagy a húgyutak (húgycső) heveny fertőzésében szenvednek, illetve akiknél a húgycső szövete károsodott. Nem kaphatnak Bulkamid® Hydrogel injekciót azok a betegek, akiknél a nemi szerv területén aktív herpeszfertőzés áll fenn.

Figyelmeztetések vagy óvintézkedések

Nincsenek a Bulkamid® injekciókkal kapcsolatban a betegre vonatkozó, kifejezett óvintézkedések vagy figyelmeztetések. A beavatkozás előtt kezelőorvosa tájékoztatni fogja a kezelésről és arról, hogy van-e olyan óvintézkedés, amit meg kell tennie, például, hogy szükség van-e arra, hogy a beavatkozást altatásban végezzék Önnél.

A jövőben Önt kezelő egészségügyi szakembereket tájékoztatnia kell majd arról, hogy Bulkamid® Hydrogel-kezelést kapott. Ha a Bulkamid® Hydrogel-kezelést követően műtetre vagy nagyobb fogászati beavatkozásra van szüksége, a kezelőorvosnak meg kell fontolnia antibiotikum adását a fertőzés kockázatának csökkentésére. Fennáll annak a kockázata, hogy a jövőbeli vizsgálatok során az implantátum betegségnek tűnik majd.

Kockázatok és figyelmeztetések

Forduljon kezelőorvosához, ha úgy gondolja, hogy a Bulkamid® Hydrogel-lel vagy annak használatával kapcsolatban mellékhatásokat tapasztal, illetve ha aggódik a kockázatok miatt. Ez a dokumentum nem helyettesíti az egészségügyi szakemberrel folytatott konzultációt, ha az szükséges. Mint minden beavatkozás esetében, itt is fennáll a fertőzés kockázata, ezért javasolt antibiotikumot kapnia a beavatkozás előtt. A beavatkozás előtt kezelőorvosa tájékoztatni fogja a rendeltetésszerű felhasználásról, a várható eredményekről, az ellenjavallatokról, az óvintézkedésekről és figyelmeztetésekről, valamint a lehetséges mellékhatásokról.

Előfordulhatnak szövődmények. Ilyen lehet például a beavatkozás közben és/vagy röviddel utána fellépő átmeneti fájdalom (a helyi érzéstelenítés segít ebben), kis mennyiségű vér a vizeletben, késleltetett vizeletürítés, fájdalmas vizeletürítés és/vagy húgyúti fertőzés. Ezek a

szövődmények átmenetiek és rendszerint néhány napon belül megszűnnek. Ritka esetben a betegnél nehezített lehet a vizeletürítés (vizeletrekedés), és szükség lehet arra, hogy egyszer használatos katétert alkalmazzon a húgyhólyag kiürítéséhez. Ez rendszerint 24 órán belül megszűnik. Felléphet sürgősségi inkontinencia, vagyis hirtelen és intenzív vizelési inger. Nagyon ritka esetben (10 000 fecskendőhasználatból kevesebb mint egyszer) fertőzés következtében fertőzőes csomó (tályog) alakulhat ki (amit antibiotikummal kezelnek).