

Latvian (LV)

Indikācija un paredzētā pacientu grupa

Bulkamid® Hydrogel ir paredzēts lietošanai kā urīnizvadkanāla pildviela, lai ārstētu urīna nesaturēšanu sievietēm, kurā nozīmīga loma ir slodzes komponentei. Bulkamid® Hydrogel ir paredzēts pacientēm sievietēm, kas vecākas par 18 gadiem.

Kontrindikācijas

Bulkamid® Hydrogel nedrīkst lietot pacientēm ar akūtu urīnpūšļa vai urīnceļu (urīnizvadkanāla) infekciju vai bojātiem urīnizvadkanāla audiem. Pacientēm, kurām ir aktīva herpes infekcija dzimumorgānu zonā, nedrīkst injicēt Bulkamid® Hydrogel.

Brīdinājumi vai piesardzības pasākumi

Jums kā pacientei nav īpašu piesardzības pasākumu vai brīdinājumu saistībā ar Bulkamid® injekcijām. Pirms procedūras ārsts Jums pastāstīs par ārstēšanu un to, vai ir kādi piesardzības pasākumi, kas Jums jāveic, piemēram, ja procedūra Jums tiks veikta vispārējā anestēzijā.

Jums jāinformē turpmākie veselības aprūpes speciālisti par ārstēšanu ar Bulkamid® Hydrogel. Ja pēc ārstēšanas ar Bulkamid® Hydrogel Jums nepieciešama ķirurģiska operācija vai apjomīga stomatoloģiska procedūra, ārstam ir jāapsver antibiotiku terapija, lai mazinātu infekciju risku. Pastāv arī risks, ka izmeklējumos turpmāk implants var izskatīties kā slimības pazīme.

Riski un brīdinājumi

Sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu, ja uzskatāt, ka rodas blakusparādības saistībā ar Bulkamid® Hydrogel vai tā lietošanu, vai ja esat noraizējies par riskiem. Šis dokuments nav paredzēts, lai vajadzības gadījumā aizstātu konsultāciju ar veselības aprūpes speciālistu. Tāpat kā jebkuras procedūras gadījumā, pastāv infekcijas risks, tāpēc pirms procedūras ieteicams lietot antibiotikas. Pirms procedūras ārsts Jums pastāstīs par paredzēto lietojumu, sagaidāmajiem rezultātiem, kontrindikācijām, piesardzības pasākumiem, brīdinājumiem un iespējamajām blakusparādībām.

Var rasties komplikācijas. Tās var ietvert īslaicīgas sāpes procedūras laikā un/vai neilgi pēc tās (tās palīdzēs novērst anestēzija), nelielu daudzumu asiņu urīnā, aizkavētu urinēšanu, sāpīgu urinēšanu un/vai urīnceļu infekciju. Šīs komplikācijas ir īslaicīgas un izzūd dažu dienu laikā. Retos gadījumos var rasties grūtības urinēt (urīna aizture), un, lai iztukšotu urīnpūsli, var būt nepieciešams īslaicīgi izmantot vienreizlietojamu katetru. Parasti šī problēma izzūd 24 stundu laikā. Var rasties neatliekama urīna nesaturēšana – pēkšņa un

intensīva nepieciešamība urinēt. Ļoti retos gadījumos ($< 1/10\,000$ šļirču) infekcijas rezultātā var veidoties infekciozs mezgliņš (abscess) (kuru ārstē ar antibakteriālu līdzekli).