

Norwegian (NO)

Indikasjon og tiltenkt pasientgruppe

Bulkamid® Hydrogel er ment brukt som et uretralt bulkingmiddel for behandling av urininkontinens hos kvinner, der stresskomponenten er betydelig. Bulkamid® Hydrogel er ment for kvinnelige pasienter (over 18 år).

Kontraindikasjoner

Bulkamid® Hydrogel må ikke brukes hos pasienter med akutt infeksjon i urinblære og urinveier (uretra), eller ved vevsskade i uretra. Pasienter med aktiv herpes i genitalregionen må ikke injiseres med Bulkamid® Hydrogel.

Advarsler og forsiktighetsregler

Det er ingen spesielle forholdsregler eller advarsler for deg som pasient i forbindelse med Bulkamid®-injeksjoner. Før prosedyren vil legen forklare deg om behandlingen, og om det er forholdsregler du trenger å ta, f.eks. hvis du skal gjøre prosedyren under narkose.

Du bør informere fremtidig helsepersonell om at du er behandlet med Bulkamid® Hydrogel. Hvis du skulle trenge kirurgi eller vesentlig tannbehandling etter behandlingen med Bulkamid® Hydrogel, bør antibiotikabehandling for å redusere risikoen for infeksjon, vurderes av en lege. Det er også en mulighet for at implantatet kan fremstå som sykdom ved senere undersøkelser.

Risikoer og advarsler

Kontakt helsepersonell hvis du tror du kan ha bivirkninger knyttet til Bulkamid® Hydrogel eller hvis du er bekymret om risikoen. Dette dokumentet er ikke ment å erstatte en leges konsultasjon hvis det er nødvendig. Som ved alle slike prosedyrer er det en viss risiko for infeksjon, og det er derfor anbefalt at du får antibiotika før prosedyren. Før prosedyren vil legen din forklare alt om planlagt bruk, forventet resultat, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, advarsler og mulige bivirkninger.

Komplikasjoner kan oppstå. Disse kan omfatte midlertidig smerte under og like etter prosedyren (lokalbedøvelse hjelper mot dette), noe blod i urinen, forsinket vannlating, smertefull vannlating og/eller urinveisinfeksjon. Disse komplikasjonene er midlertidige og forsvinner vanligvis i løpet av noen få dager. I svært sjeldne tilfeller kan pasienter oppleve problemer med å late vannet normalt, og kan trenge et midlertidig engangskateter for å tømme urinblæren. Dette går som regel over innen 24 timer. Trang-inkontinens, som er en plutselig og intens trang til å late vannet, kan forekomme. I svært sjeldne tilfeller (< 1/10

000 injeksjoner) kan det oppstå en byll (abscess) pga. en lokal infeksjon (som behandles med antibiotika).