

Portuguese (PT)

Indicação e grupo de doentes previsto

O Bulkamid® Hydrogel destina-se a ser utilizado como um agente de volume uretral para o tratamento da incontinência urinária feminina em que a componente do esforço é significativa. O Bulkamid® Hydrogel destina-se a doentes do sexo feminino, com mais de 18 anos de idade.

Contraindicações

Bulkamid® Hydrogel não deve ser utilizado em doentes que sofram de infeção aguda da bexiga ou do trato urinário (uretra), ou de tecido danificado na uretra. As doentes com herpes ativo na zona genital não devem receber injeção de Bulkamid® Hydrogel.

Advertências e precauções

Não existem precauções ou advertências específicas para si, enquanto doente, relativamente às injeções de Bulkamid®. Antes do procedimento, o seu médico informá-la-á sobre o tratamento e se existem precauções que deve tomar, por exemplo, se vai ser submetida a um procedimento sob anestesia geral.

Deve informar os futuros profissionais de saúde sobre o seu tratamento com Bulkamid® Hydrogel. Se tiver de ser submetida a uma cirurgia ou a uma intervenção dentária importante após o seu tratamento com Bulkamid® Hydrogel, o médico deve considerar a possibilidade de um tratamento com antibióticos para reduzir o risco de infeção. Existe também o risco de o implante aparentar ser uma doença em exames futuros.

Riscos e advertências

Contacte o seu profissional de saúde se achar que está a sentir efeitos secundários relacionados com Bulkamid® Hydrogel ou com a sua utilização ou se estiver preocupada com os riscos. Este documento não se destina a substituir uma consulta com o seu profissional de saúde, se necessário. Como em qualquer procedimento, existe o risco de infeção, pelo que se recomenda a administração de antibióticos antes do procedimento. Antes do procedimento, o seu médico informá-la-á sobre a utilização prevista, os resultados esperados, as contraindicações, as precauções, as advertências e os potenciais efeitos secundários.

Podem ocorrer complicações. Estas podem incluir dores temporárias durante e/ou logo após o procedimento (a anestesia local ajuda neste caso), uma pequena quantidade de sangue na urina, atraso na micção, micção dolorosa e/ou infeção do trato urinário. Estas complicações são temporárias e desaparecem normalmente em poucos dias. Em casos

raros, as doentes podem ter dificuldade em urinar (retenção) e podem necessitar da utilização de um cateter descartável para esvaziar a bexiga. Esta situação resolve-se normalmente no prazo de 24 horas. Pode ocorrer incontinência de urgência, que é uma necessidade súbita e intensa de urinar. Em casos muito raros (<1/10 000 seringas), pode formar-se um nódulo infeccioso (abscesso) em consequência de uma infeção (que é tratada com um agente antibacteriano).