

Slovak (SK)

Indikácia a určená skupina pacientov

Bulkamid® Hydrogel je určený na použitie ako látka na vyplňanie steny močovej rúry na liečbu inkontinencie moču u žien, pri ktorej zohráva významnú úlohu stresová zložka. Bulkamid® Hydrogel je určený pre dospelé pacientky (staršie ako 18 rokov).

Kontraindikácie

Bulkamid® Hydrogel sa nesmie používať u pacientok trpiacich akútnou infekciou močového mechúra alebo močových ciest (močovej rúry) alebo poškodením tkaniva močovej rúry. Pacientkam, ktoré majú aktívny herpes v genitálnej oblasti, sa nesmie podať injekcia hydrogélom Bulkamid® Hydrogel.

Výstrahy alebo bezpečnostné opatrenia

Na injekcie hydrogélom Bulkamid® sa nevzťahujú žiadne konkrétne bezpečnostné opatrenia ani výstrahy, ktoré by sa týkali vás ako pacientky. Pred zákrokom vás bude váš lekár informovať o liečbe a o tom, či by ste mali prijať nejaké bezpečnostné opatrenia, napríklad či budete musieť absolvovať zákrok pod celkovou anestéziou.

Všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vás budú v budúcnosti liečiť, musíte informovať o svojej liečbe hydrogélom Bulkamid® Hydrogel. Ak budete potrebovať chirurgický zákrok alebo významný dentálny zákrok po liečbe hydrogélom Bulkamid® Hydrogel, lekár má zvážiť antibiotickú liečbu na zníženie rizika infekcie. Existuje aj riziko, že implantát sa pri budúcich vyšetreniach bude javiť ako nejaké ochorenie.

Riziká a výstrahy

Ak si myslíte, že sa u vás prejavujú vedľajšie účinky súvisiace s hydrogélom Bulkamid® Hydrogel alebo jeho použitím alebo ak máte obavy z rizík, obráťte sa na svojho lekára. Tento dokument nenahrádza konzultáciu s lekárom, ak je potrebná. Tak ako pri akomkoľvek inom zákroku, aj v tomto prípade existuje riziko infekcie, preto sa odporúča, aby ste pred zákrokom dostali antibiotiká. Pred zákrokom vás bude váš lekár informovať o určenom použití, očakávaných výsledkoch, kontraindikáciách, bezpečnostných opatreniach, výstrahách a potenciálnych vedľajších účinkoch.

Môžu sa vyskytnúť komplikácie. Môžu zahŕňať dočasnú bolesť počas zákroku a/alebo krátko po ňom (s tým pomôže lokálna anestézia), malé množstvo krvi v moči, oddialené močenie, bolestivé močenie a/alebo infekciu močových ciest. Tieto komplikácie sú dočasné a bežne odznejú v priebehu niekoľkých dní. V zriedkavých prípadoch sa u pacientok môžu vyskytnúť ťažkosti s močením (retencia), ktoré si môžu vyžadovať použitie

jednorazového katétra na vyprázdenie močového mechúra. To zvyčajne do 24 hodín ustúpi. Môže sa vyskytnúť nutkavá inkontinencia, čo je náhla a intenzívna potreba močiť. Vo veľmi zriedkavých prípadoch (< 1/10 000 injekčných striekačiek) sa môže vytvoriť infekčná hrudka (absces) následkom infekcie (ktorá sa lieči antimikrobiálnou látkou).