

Slovene (SL)

Indikacija in predvidena skupina bolnic

Polnilo Bulkamid® Hydrogel je namenjeno uporabi kot sredstvo za učvrstitev stene sečnice za zdravljenje ženske urinske inkontinence s prisotno izrazito stresno komponento. Polnilo Bulkamid® Hydrogel je namenjeno odraslim bolnicam (starim več kot 18 let).

Kontraindikacije

Polnila Bulkamid® Hydrogel ni dovoljeno uporabljati pri bolnicah z akutno okužbo mehurja ali sečil (sečnice) ali poškodovanim tkivom v sečnici. Bolnicam z aktivnim herpesom na področju spolovil se ne sme injicirati polnila Bulkamid® Hydrogel.

Opozorila ali previdnostni ukrepi

Za vas kot bolnico ni posebnih previdnostnih ukrepov ali opozoril zvezi s polnilom Bulkamid® Hydrogel. Pred posegom vas bo zdravnik seznanil z načinom zdravljenja in morebitnimi previdnostnimi ukrepi, na primer, če bo poseg potekal v splošni anesteziji.

Bodoče zdravstvene delavce obvestite o svojem zdravljenju s polnilom Bulkamid® Hydrogel. Če po injiciranju polnila Bulkamid® Hydrogel potrebujete operacijo ali večji zobozdravstveni poseg, mora zdravnik razmisliti o zdravljenju z antibiotiki za zmanjšanje tveganja okužbe. Obstaja tudi tveganje, da bi bilo injicirano polnilo pri prihodnjih pregledih videti kot bolezen.

Tveganja in opozorila

Če se vam zdi, da pri sebi zaznavate neželene učinke, povezane s polnilom Bulkamid® Hydrogel ali njegovo uporabo, ali če ste zaskrbljeni zaradi tveganj, se obrnite na svojega zdravnika. Ta dokument ne nadomešča posveta z vašim zdravnikom, če ga potrebujete. Obstaja tveganje okužbe, kot pri vsakem posegu, zato pred posegom priporočamo jemanje antibiotikov. Pred posegom vas bo zdravnik seznanil s predvideno uporabo, pričakovanimi rezultati, kontraindikacijami, previdnostnimi ukrepi, opozorili in morebitnimi neželenimi učinki.

Možen je pojav zapletov. Ti lahko vključujejo začasno bolečino med posegom in kratek čas po njem (pri tem bo pomagala anestezija), majhno količino krvi v urinu, boleče uriniranje, in/ali okužbo sečil. Ti zapleti sočasni in običajno izzvenijo v nekaj dneh. V redkih primerih lahko imajo bolnice težave z normalnim uriniranjem (retencija) in lahko za praznjenje mehurja potrebujejo kateter za enkratno uporabo. Težava običajno izzveni v 24 urah. Pojavi se lahko urgentna inkontinenca, ki je nenadna in intenzivna potreba po uriniranju. V zelo

redkih primerih ($< 1/10.000$ brizg) lahko zaradi okužbe (ki se zdravi s protibakterijskim zdravilom) nastane infekcijski vozlič (absces).