

## **Spanish (ES)**

### **Indicación y grupo de pacientes previsto**

Bulkamid® Hydrogel debe usarse como agente de engrosamiento uretral para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina en la que el componente de esfuerzo es significativo. Bulkamid® Hydrogel está destinado a pacientes de sexo femenino mayores de 18 años.

### **Contraindicaciones**

Bulkamid® Hydrogel no debe utilizarse en pacientes que padezcan una infección aguda en la vejiga o en las vías urinarias (uretra), o que tengan algún daño en el tejido de la uretra. Las pacientes con herpes activo en la zona genital no deben recibir inyecciones de Bulkamid® Hydrogel.

### **Advertencias o precauciones**

No existen precauciones o advertencias específicas para usted como paciente en relación con las inyecciones de Bulkamid®. Antes de la intervención, su médico le informará sobre el tratamiento y si debe tomar alguna precaución, por ejemplo, si va a someterse a la intervención bajo anestesia general.

Debe informar a futuros profesionales sanitarios de su tratamiento con Bulkamid® Hydrogel. Si tuviera que someterse a una intervención quirúrgica o a un tratamiento dental importante después del tratamiento con Bulkamid® Hydrogel, el médico deberá considerar la posibilidad de administrarle un tratamiento antibiótico para reducir el riesgo de infección. También existe el riesgo de que el implante aparezca como una anomalía clínica en futuros exámenes o exploraciones.

### **Riesgos y advertencias**

Póngase en contacto con su profesional sanitario si cree que está experimentando efectos secundarios relacionados con Bulkamid® Hydrogel o su uso, o si le preocupan los riesgos. Este documento no pretende sustituir a una consulta con su profesional sanitario en caso necesario. Como en cualquier procedimiento, existe riesgo de infección, por lo que se recomienda tomar antibióticos antes de la intervención. Antes del procedimiento, su médico le informará sobre el uso previsto, los resultados esperados, las contraindicaciones, las precauciones, las advertencias y los posibles efectos secundarios.

Pueden producirse complicaciones. Estas pueden ser dolor transitorio durante la intervención o poco tiempo después de ella (la anestesia local ayuda en este caso), una pequeña cantidad de sangre en la orina, retraso en la micción, micción dolorosa o

infección urinaria. Estas complicaciones son pasajeras y normalmente se resuelven en unos días. En raras ocasiones, las pacientes pueden experimentar dificultades para orinar (retención) y puede ser necesario utilizar una sonda desechable para vaciar la vejiga. El problema normalmente se resuelve en menos de 24 horas. Puede producirse incontinencia de urgencia, que es una necesidad repentina e intensa de orinar. En casos muy raros (<1/10 000 jeringas) puede formarse un nódulo infeccioso (absceso) como resultado de una infección (que se trata con un agente antibacteriano).