

Swedish (SV)

Indikation och avsedd patientgrupp

Bulkamid® Hydrogel är avsedd att användas som fyllnadsämne för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Bulkamid® Hydrogel är avsedd för vuxna kvinnliga patienter (över 18 år).

Kontraindikationer

Bulkamid® Hydrogel får inte användas till patienter med akut infektion i urinblåsan eller urinröret, eller skadad vävnad i urinröret. Patienter med aktiv herpes i underlivet får inte behandlas med Bulkamid® Hydrogel.

Varningar eller försiktighetsåtgärder

Det finns inga särskilda försiktighetsåtgärder eller varningar för dig som patient när det gäller Bulkamid®-injektioner. Före ingreppet kommer läkaren att informera dig om behandlingen och berätta ifall du behöver vidta några försiktighetsåtgärder, till exempel om ingreppet ska utföras under narkos.

Du bör informera hälso- och sjukvårdspersonal som du träffar i framtiden om din behandling med Bulkamid® Hydrogel. Om du skulle behöva kirurgi eller större tandvårdsingrepp efter behandlingen med Bulkamid® Hydrogel bör läkaren överväga antibiotikabehandling för att minska risken för infektion. Det finns också en risk för att implantatet kan verka vara en sjukdom vid framtida undersökningar.

Risker och varningar

Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om du får biverkningar som kan ha samband med Bulkamid® Hydrogel eller dess användning, eller om du är orolig för eventuella risker. Detta dokument är inte avsett att ersätta rådgivning med hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Liksom vid alla ingrepp finns en risk för infektion, och därför rekommenderas att du får antibiotika före ingreppet. Före ingreppet kommer läkaren att informera dig om avsedd användning, förväntade resultat, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar och potentiella biverkningar.

Komplikationer kan uppstå. Det kan till exempel röra sig om tillfällig smärta under och/eller direkt efter ingreppet (lokalbedövning kommer att hjälpa mot detta), en mindre mängd blod i urinen, fördröjd urinering, smärta vid urinering och/eller urinvägsinfektion. Dessa komplikationer är tillfälliga och brukar gå över inom några dagar. I sällsynta fall kan patienten uppleva svårigheter att urinera (retention) och kan behöva använda en engångskateter för att tömma urinblåsan. Detta tillstånd brukar gå över inom 24 timmar.

Trängningsinkontinens, dvs. plötsligt och akut behov att kissa, kan uppstå. I mycket sällsynta fall ($< 1/10\,000$ sprutor) kan en infektiös knöl (varbildning) uppstå till följd av en infektion (som behandlas med ett antibakteriellt medel).